

ACONDICIONADOR DE BRACKETS SAND PLUS



Arenador para brackets nuevos y reacondicionador de brackets metálicos y cerámicos.



ASVADENT



DABI ATLANTE
La innovación viene de aquí.



swident GNATUS

Padre Aller, 26 – Bajo
33012 - OVIEDO
Tlf. 985 277 343

Dr. Moreno, 12 – Bajo
47008 - VALLADOLID
Tlf. 983 274 584

Núñez Morgado, 5
28036 - MADRID
Tlf. 902 996 538

Acondicionador de brackets



Se trata de un arenador para brackets nuevos que aumenta un 18% su fijación y además permite reacondicionar brackets metálicos y cerámicos. Contiene una varilla de agarre para 4 brackets nuevos o utilizados.

CARACTERÍSTICAS:

Diseño moderno y ergonómico.
Limpia y recondiciona brackets metálicos y cerámicos sin que éstos pierdan calidad.
Posee un sistema hermético de abrasión.
Reutilización del óxido de aluminio.

UTILIZACIÓN:

Conecte el equipo en la red de aire.
Coloque una fina capa de cera en el área hueca del tallo.
Fije el bracket en la cera de la zona.
Accione el botón con el tiempo requerido para la limpieza de la pieza, 10-25 segundos, moviendo la varilla hacia la derecha y la izquierda durante el proceso.
Retire el bracket.

MANTENIMIENTO:

Usar óxido de aluminio entre 90 y 125 micras/indicado uso del filtro de aire.
Limpiar el filtro del óxido y cambiar siempre que esté sucio (de acuerdo con el tiempo de uso).
Accione la válvula OFF cada vez que deje de utilizar el reciclador de brackets.
Nunca sumerja el aparato en agua, utilice un paño húmedo.

REF. 09070041



Padre Aller, 26 – Bajo
33012 - OVIEDO
Tlf. 985 277 343

Dr. Moreno, 12 – Bajo
47008 - VALLADOLID
Tlf. 983 274 584

Núñez Morgado, 5
28036 - MADRID
Tlf. 902 996 538